



Planos inclinados

Chinesport agradece a todos los colaboradores que han dado su contribución para alcanzar el presente documento.

Camillas de terapia	1
Aparatos electromédicos	2
Rehabilitación	3
Terapia con polea	4
Terapia ocupacional	5
Bipedestadores	6
Planos inclinados	7
Paralelas y escaleras de ejercicio	8
Andadores	9
Cintas de correr	10
Tracciones	11
Gimnasia médica	12
Hidroterapia	13
Análisis postural	14
Elevación y traslado	15
Sistemas de higiene	16
Sillones de elevación	17
Transporte de pacientes	18

La empresa se reserva el derecho de modificar las dimensiones y tipo de fabricación, hacer mejoras y otros cambios en sus productos. Todos los derechos de reproducción de la totalidad o parte de los diseños e ilustraciones están reservados en todo el mundo. El proceso de impresión no puede dar una perfecta reproducción de los colores.



ISO 9001
ISO 13485



Planos inclinados

1. Marcus line	pag. 02
1.1. Introducción	pag. 02
1.2. Significado del código	pag. 03
1.3. Guía de la configuración	pag. 04
1.3.1. Posición del paciente	pag. 04
1.3.2. Regulación de la inclinación	pag. 05
1.3.3. Tipo de control	pag. 06
1.3.4. Las peanas	pag. 08
1.3.5. Anchura de la secciones	pag. 10
1.3.6. Tipo de simipiel	pag. 11
1.3.7. Colores de la tapicería	pag. 11
1.4. Accesorios	pag. 12
1.4.1. Bandas y otros elementos acolchados	pag. 13
1.4.2. Soportes laterales	pag. 14
1.4.3. Mesa y otros accesorios aplicables	pag. 16
1.4.4. La transformación del plano inclinado	pag. 18
1.4.5. Las peanas y las sandalias	pag. 20
1.4.6. Partes electricas	pag. 21
1.5. Opciones a elegir en el modelo base	pag. 22
2. Planos inclinados para posición supina y tratamientos	pag. 24
3. Camilla Bobath para ejercicios estáticos	pag. 26
Apéndice	
I Tabla de accesorios	pag. 28
II Cojines posturales	pag. 30
III Otras camillas para tratamientos	pag. 32

Como parte de un programa de rehabilitación del movimiento, los Planos Inclinales permiten lograr gradualmente la postura erguida en estática prono o en decúbito supino cuando el paciente no es capaz de cargar su propio peso corporal sobre las extremidades inferiores.

Los Planos Inclinales CHINESPORT en posición supina o prono están indicados para su uso tanto para adultos como para niños.



En particular, se puede elegir entre un modelo básico para los ejercicios estáticos supinos o pronos, destinados a niños o adultos. El modelo elegido es entonces de todos modos transformable con los accesorios apropiados. El ajuste de la inclinación del Plano Inclinado puede producirse mediante pistón hidráulico o por medio de la fuente de alimentación, una red o una batería recargable 24V. Los tipos de control de dicho ajuste pueden ser con la mano o con el pie. Están previstas varias opciones para la base de apoyo del paciente en función a los ajustes permitidos, pero no se opone a la intercambiabilidad entre las diferentes plataformas de módulos disponibles. Se puede elegir entre dos opciones alternativas para el ancho de segmentos tapizados y una selección de 24 diferentes colores de tapizado de semilpiel. Finalmente una amplia gama de accesorios pueden contribuir a equipar el Plano Inclinado.

7

POSICIÓN 4

Posición del paciente

Opciones:

- 1 - Con el cabezal en posición supina
- 2 - Sin cabezal en posición supina

POSICIÓN 5

Regulación de la inclinación

Opciones:

- E - Eléctrico con cable de red
- B - Eléctrico, con alimentación a batería 24V
- H - Asistido por pistón hidráulico

POSICIÓN 6

Tipo de control

Opciones:

- A - Eléctrico, con mando a pedal
- D - Eléctrico, con mando manual
- G - Eléctrico, con doble control
- C - Hidráulico, con pedal

POSICIÓN 7

Las peanas

Opciones:

- 1 - Perna individual
- 2 - Perna individual regulable
- 3 - Perna regulable 2 módulos

POSICIÓN 8-9-10

Anchura secciones

Opciones:

- 060 - Ancho 60 cm
- 075 - Ancho 75 cm

POSICIÓN 11

Tipo similpiel

W - Colección Giotto

POSICIÓN 12

Colores tapicería

Gama standard de 24 colores




Modelo representato LT41 BG2 060 W3



POSICIÓN 4

Posición del paciente

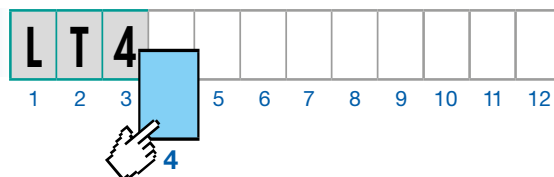


Es necesario, en primer lugar, expresar una preferencia para la posición de la terapia del paciente, o ya sea en posición supina o prono estática. La diferencia sustancial entre los dos modelos LT41 y LT42 está representada por la longitud del Plano Inclinado. En particular el modelo LT42 ha sido diseñado para ser utilizado en estática prona por pacientes altos al menos igual o mas a 140 cm, pero también es adecuado en pediatría para ejercicios estáticos en posición supina. La longitud de ambos modelos es variable en función del ajuste del reposapié elegido. Para la anchura de los segmentos de tapizados también se proporcionan dos opciones estándar, es decir, una anchura de 60 cm o 75 cm. Para más información sobre las plataformas de opciones de soporte y la anchura de los segmentos de tapizados, consulte las siguientes páginas en correspondencia de las posiciones 7 a 10 de la Guía de configuración del producto.




1 Con el cabezal en posición supina

Largo A:
con peana opción 1
min-max: 182-203 cm
con peana opción 2
min-max: 191-197 cm
con peana opción 3
min-max: 189-197 cm

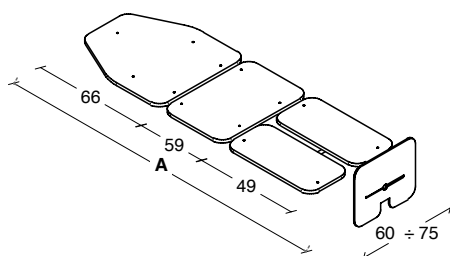

2 Sin el cabezal en posición supina

Largo A:
con peana opción 1
min-max: 115-136 cm
con peana opción 2
min-max: 124-130 cm
con peana opción 3
min-max: 122-130 cm

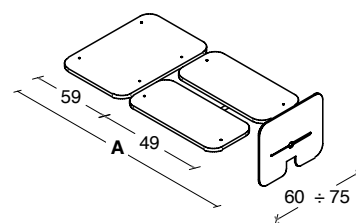


NOTA IMPORTANTE: se puede transformar un modelo en otro simplemente quitando o añadiendo, comprando por separado un accesorio, el cabezal de la camilla LT41. Para más información sobre este aspecto, por favor refiéranse a la consulta de los accesorios que se presentan a continuación bajo el título "la transformación del la camilla estática".

POSICIÓN 5

Regulación de la inclinación

Los Planos inclinados Chinesport de la serie Marcus pueden ajustarse la inclinación eléctricamente, mediante una fuente de energía a la pared o por una batería recargable, así como por medio de un pistón hidráulico. Este último puede ser la opción mas adecuada cuando el ambiente no es adecuado para un ajuste de tipo eléctrico o por un menor mantenimiento.

La decisión de diseño se ha realizado con uno de los actuadores eléctricos más fiables del mercado. El grado de protección mínimo para todos los componentes eléctricos es IP54.

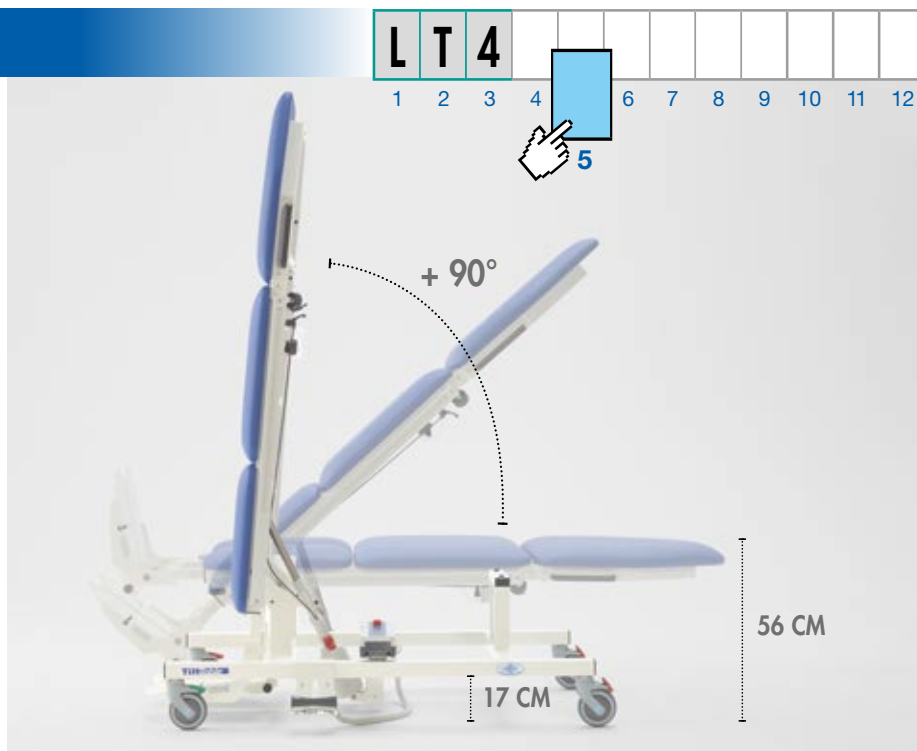

E **Electrico con alimentació a pared**
La alimentación de red standard es de 220V 50-60Hz y todas las unidades trabajan con una bajísima tension de seguridad. Los clientes pueden hacer una petición específica de una alimentación a 110V 50-60Hz y una clavija no schuko.



B **Electrico, con alimentación a batería**
Esta es una opción alternativa a la regulación eléctrica de la inclinación. El Plano Inclinado puede alimentarse mediante una batería recargable 24V suministrada con un carga baterías 110 / 220V 50-60 Hz.



H **Asistido por pistón hidráulico**
Regulación de la inclinación mediante pistón hidráulico.

EN CASO DE FALLO DE ALIMENTACIÓN



Los modelos LT41 y LT42 son Suministrados de serie con un dispositivo de seguridad que permite al paciente volver a una posición horizontal, de una manera segura. Sobre el bastidor hay una palanca que acciona el dispositivo mecánico para el descenso




INDICADOR DE INCLINACIÓN

Todos los Planos Inclinados de CHINESPORT se suministran con un goniómetro para proporcionar una indicación de inclinación en grados. Durante el programa de rehabilitación, por lo tanto es posible monitorizar la progresión logrando y manteniendo una posición vertical.

POSICIÓN 6

Tipo de control

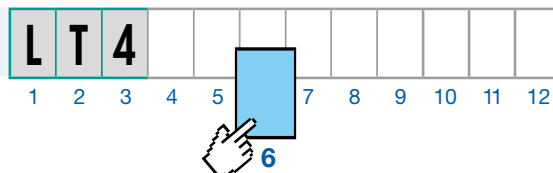

En relación con el modo elegido del ajuste de la inclinación del Plano Inclinado, eléctrico, o hidráulico, están disponibles diferentes tipos de mandos, es posible elegir entre tres opciones, a pedal, o un soporte aplicado en la base del Plano Inclinado, o incluso un teclado. En el caso de ajuste de la inclinación con pistón hidráulico el mando es un doble pedal disponible en ambos lados del Plano Inclinado.



A **Eléctrico con mando a pedal**
Este tipo de control se puede utilizar para activar la función de ajuste eléctrico de la inclinación. El pedal se coloca en el suelo. El cable de conexión permite una total libertad de movimientos.



D **Eléctrico, con mando manual**
Mando manual ergonómico imantado. Se aplica en las partes metálicas de la Camilla. Se suministra con cable de conexión.



G Eléctrico, con doble control
El mando es introducido en un soporte especial, el cual se fija a la base de la estructura. El mando a pedal con su soporte simplifica la transferencia del plano inclinado y eventualmente las operaciones de limpieza cerca de la misma.



C Hidráulico, con pedal
En caso de ajuste de la inclinación del Plano Inclinado mediante un pistón hidráulico, el pedal es la única opción disponible. Este ajuste hidráulico es ideal para situaciones en las que no hay suministro de energía o cuando es necesario mover el plano inclinado con facilidad.


PARA UNA FÁCIL TRANSFERENCIA DE ESPACIO REDUCIDO

La versión de pistón hidráulico tiene un sistema rápido por el cual se puede mover de situación para reducir el espacio del plano inclinado. El soporte a pedal encuentra después una posición segura sobre la base durante la posible transferencia de un ambiente a otro.



POSICIÓN 7

Las peanas

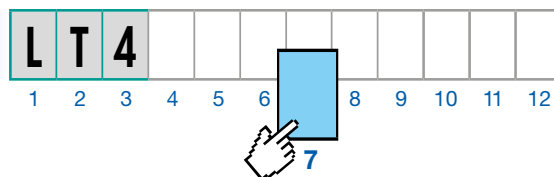


Se pueden escoger entre tres diversas bases de apoyo para el paciente, bien la peana única, o dos peanas inclinables en positivo y negativo de modo independiente, o dos peanas inclinables que son además regulables en altura de manera independiente.



1 Peana única

Peana entera, no regulable en inclinación; el soporte es regulable de varios centímetros en la dirección de la longitud del Plano Inclinado; accesorio sobre pedido AC0002.

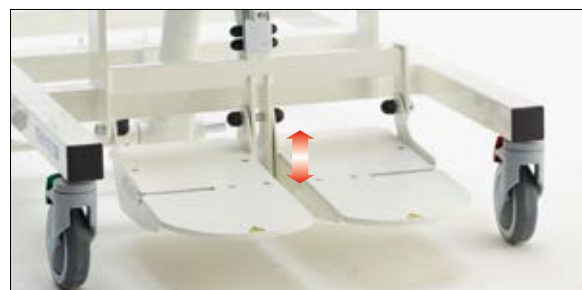

2 Peanas inclinables, módulo único

Peanas, derecha e izquierda, regulables de modo independiente en inclinación $\pm 20^\circ$; el grupo de soporte es regulable de algunos centímetros en la longitud del plano inclinado; accesorio sobre pedido AC0002.



3 Peanas inclinables, dos módulos

Peanas, derecha e izquierda, regulables de modo independiente en inclinación $\pm 20^\circ$; el soporte de cada peana es además regulable separadamente de algunos centímetros en la dirección longitudinal del Plano Inclinado; accesorio sobre pedido AC0002.

PEANAS INTERCAMBIABLES

Cuando adquirimos el Plano Inclinado, es necesario indicar las peanas que necesitamos. Sin embargo, también es posible, pedir otro tipo de peanas para hacer una configuración diferente. Para obtener más información, consultar el capítulo dedicadas a ellas.

Nota: Como resultado del tipo de Plano Inclinado que elija, la longitud total del mismo puede cambiar. Para más detalles ver los dibujos técnicos.

REGULACIÓN EN INTRA - EXTRA ROTACIÓN Y EN ANTERIOR - POSTERIOR DE LOS PIES

Para estabilizar y contener los pies, sobre la peana se montan las sandalias intra-extra, regulables en rotación intra-extra en anteriorposterior. Las sandalias se pueden pedir como accesorio, código AC0002.





REGULACIÓN INDEPENDIENTE EN FLEXO-EXTENSIÓN PARA LOS PIES

La elección de una opción de configuración para las peanas independientes consiente una regulación manual de la peana única. Dicha regulación es posible desde $+20^\circ$ a -20° para un correcto posicionamiento del pie en flexo-extensión si fuese necesario. En caso de pie zambo es posible pedir además una cuña como accesorio AC0096, el cual consiente variar el rango de inclinación, o desde $+10^\circ$ a -30° .




CUÑA PARA PIES ZAMBOS

Es posible adaptar una cuña de apoyo para una mayor inclinación de las peanas en extensión hasta -30° y en flexión $+10^\circ$ cuando sea necesario para el paciente con pie zambo siendo un accesorio específico.




POSICIÓN 8-9-10

Anchura de las secciones

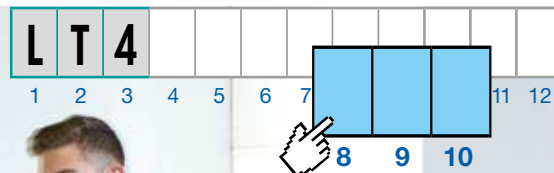

Anchura A:
con peana opción 1
min-max: 182-203 cm
con peana opción 2
min-max: 191-197 cm
con peana opción 3
min-max: 189-197 cm

Largo A:
con peana opción 1
min-max: 115-136 cm
con peana opción 2
min-max: 124-130 cm
con peana opción 3
min-max: 122-130 cm

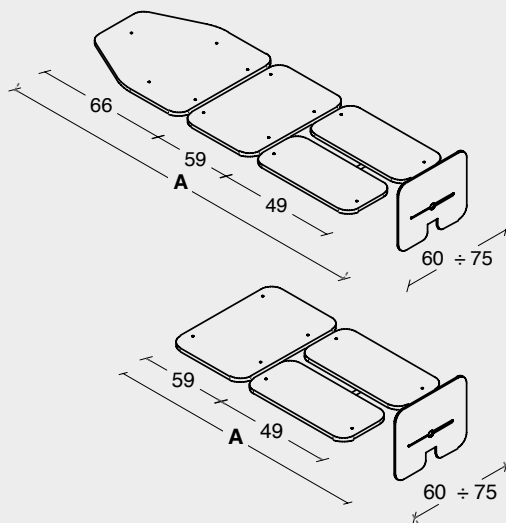

Es posible escoger entre dos diversas anchuras de los segmentos de tapicería.

0 6 0 Anchura interna 60 cm

0 7 5 Anchura interna 75 cm

ADVERTENCIA: invitamos a prestar particular atención a los accesorios aplicables en función de la opción elegida.

DENSIDAD Y ALTURA DEL RELLENO



Chinesport propone como altura y densidad normal de los segmentos rellenos respectivamente 40 mm y 30 kg/m³ a excepción de la línea Bobath. Sin embargo nuestro Centro de tapicería está preparado para manejar incluso requisitos especiales fuera de lo standard.

ESTABILIDAD DE LOS PANELES




Está garantizado siempre por un sistema de fijamiento con ganchos en la estructura. Dichos ganchos son muy fáciles de sustituir en caso de uso o de daños del segmento acolchado si fuera necesario.

POSICIÓN 11

Tipo de simpiel

L T 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

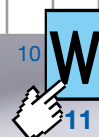

Colección Giotto Línea Estandar

Giotto es el tejido recubierto ignífugo. Su estructura es resistente y de fácil mantenimiento hacen que sea especialmente adecuado para su uso en hospitales, hogares de ancianos, balnearios, centros de rehabilitación y gimnasios. Giotto se presenta con un efecto de piel y un acabado superficial brillante, en una amplia gama de colores. Giotto contiene Vinyzene, un antimicrobiano que se añade durante las etapas de procesamiento creando una barrera defensiva contra ácaros, bacterias y hongos, evitando olores y alergias desagradables.



CONFORT Y ELASTICIDAD



RESISTENCIA A LAS RADIACIONES UV



IMPERMEABILIDAD



FACIL MANUTENCIÓN



RESISTENCIA A LOS RAYOS UV



RESISTANT TO UV RADIATIONS



TRATAMIENTO FUNGICIDA

CARACTERISTICAS TECNICAS	UNIDAD	NORMAS	VALORES
Peso	g/m ²	-	550
Altura	cm	-	140
Composición	-	-	88% PVC - 12% PES
Resistencia a la abrasión	cicli	ISO 5470-2	100.000
Resistencia del color al frote en seco	Escala de grises	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Resistencia de los colores al frote en húmedo	Escala de grises	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Resistencia de los colores a la luz	Escala de azul	UNI EN ISO 105-B02	6
Resistencia de los colores al sudor	Escala de grises	ISO 105-E04	4
Adhesión	N	UNI EN ISO 2411	60
Alargamiento a la rotura	N	UNI 1421	long. 450 / trasv. 190
Resistencia al desgarro	N	UNI 4818-9 met.B	long. 42 / trasv. 35
RESISTENCIA AL FUEGO UNI 9175 classe 1 IM - EN 1021-2 BS 5852-1			

POSICIÓN 12

L T 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Colores de la tapicería

Al realizar el pedido recuerde especificar el código del color de la tapicería. Disponible en 24 colores estándar.

A BLANCO	N MARFIL	8 BEIGE	7 GRIS CENIZA	K GRIS	S MARON OSCURO
B CREMA	4 AMARILLO	T VERDE	1 VERDE CIRUJANO	6 VERDE CLARO	E AGUAMARINA
Z NARANJA	G CORAL	F ROJO	H BURDEOS	9 FUCSIA	Q LILA
R AZÚL FIORDALISO	2 AZÚL CLARO	3 AZÚL MARINO	L AZÚL OSCURO	M ANTRACITA	P NEGRO



02023 SET DE LIMPIEZA

Para la higiene y desinfección de la parte acolchada en simpiel de todos los planos inclinados y tratamientos. El set se compone de 3 botellas de limpieza protectora.



XCAT0020131 CARTA DE COLORES

Para los estudios del diseño como para el profesional que desee comprobar el color real de la piel antes de tomar una decisión de compra, podemos enviar sobre pedido y gratuitamente una carpeta con nuestras de colores.

BANDAS Y OTROS ELEMENTOS TAPIZADOS



Nuestros planos inclinados no tienen ninguna banda o cincha de serie. Una serie de bandas nacieron gracias a la colaboración de profesionales. Están disponibles respondiendo a las exigencias y preferencias posibles. Por lo tanto, se ruega añadir en caso de pedido el número y tipo de la banda elegida.



AC0005 BANDA BASE

Para una mayor contención de la persona con la fijación a la altura deseada en los carriles de guía. (Una sola pieza)



AC0006 ACOLCHADO PARA BANDA

Cojín acolchado para un mayor confort y soporte a la persona. Se tiene que utilizar con el cinturón código AC0005. (pieza individual)



AC0560 BANDA TRONCO ACOLCHADO

Banda con soporte acolchado para contener la persona de forma. Se aconseja para el tronco o pelvis. (pieza individual).



AC0561 BANDA PIERNAS SEPARADAS

Banda con soporte acolchado para posicionar y estabilizar un miembro inferior. Este tipo de banda se aplica en Planos Inclinados que tienen una guía central para el anclaje de la banda. En particular, se puede utilizar para todos los Planos Inclinados en posición supina. Especifico solo para la opción de 60 cm de ancho del Plano Inclinado. (dos piezas)



AC0088 BANDA ACOLCHADA PARA PIERNAS

Banda acolchada para el apoyo de contención de ambas extremidades inferiores. Cuenta con un sistema de doble anclaje lateral y una aplicación más fácil para el operador. Se puede utilizar para todos los Planos Inclinados en posición supina. (Una sola pieza)



AC0913 CORREA ERGONOMICA 60

Puede ser utilizada para la contención del tronco / pelvis o para las piernas. Es específica solo para la opción de 60 cm de ancho del Plano Inclinado. (Una sola pieza)

AC0947 CORREA ERGONOMICA 75

Mismas características del cod. AC0913, pero apto para la versión de 75 cm. de ancho de los Planos Inclinados. (Una sola pieza)

BANDAS Y OTROS ELEMENTOS ACOLCHADOS

7


AC0949.W ? COJÍN CERVICAL LT4

Cojín acolchado y conformado para una contención lateral y una estabilización a nivel cervical. Está dotado de una banda específica para una rápida aplicación o eliminación en función del caso concreto. Elejir el color de la tapicería. (una sola pieza)




AC0912 GUÍA PARA BANDA DE BASE

Un mango específico puede ser fijado en una guía central especialmente diseñada para este fin, que se encuentra entre la sección de la pata del Plano Inclinado. Puede ser montado fácilmente sin el uso de ninguna herramienta. Este mango permite, por lo tanto, mantener alineada una eventual banda con los códigos AC0005 BANDA DE BASE o AC0561 BANDAS PIERNAS SEPARADAS que también mejora la contención de las piernas. El mango puede deslizarse y ser ajustado en altura a lo largo del rail central, y luego fijarse en cualquier posición deseada.

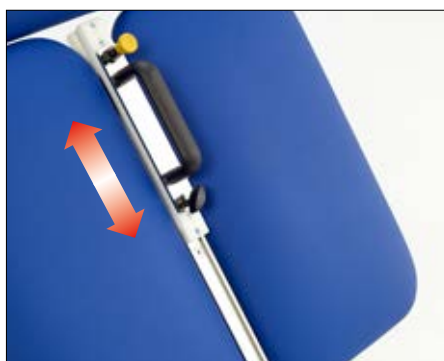

AC0911 CUÑA DIVARICATOR

Si fuese necesario, una cuña acolchada se puede montar sobre la guía central para mantener las piernas del paciente separadas. Se puede montar fácilmente sin el uso de ninguna herramienta. Este dispositivo también incluye un mango que puede ser utilizado para mantenerse alineado con una eventual banda con código AC0005 BANDA DE BASE o AC0561 BANDA PIERNAS SEPARADAS. El mango mejora la Inmovilización de las piernas. Una vez que se haya montado la cuña, esta puede deslizarse y ser ajustada en altura a lo largo del rail central, y por lo tanto fijada en cualquier posición deseada.

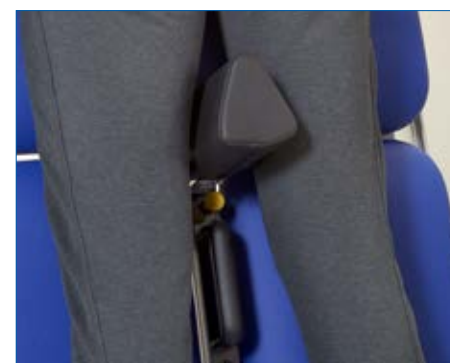

APLICACIÓN RÁPIDA DE LAS BANDAS DE CONTENCIÓN

El enfoque en el diseño es constante también en tratar de hacer más fácil el trabajo de los terapeutas, lo que reduce los tiempos de preparación con los accesorios necesarios. En particular, todas las bandas disponibles están equipadas con sistema de cierre de velcro para la contención del paciente cuando se considere apropiado y son aplicables con anclaje en barras laterales.



? ELECCIÓN DE LOS COLORES DE LA TAPICERÍA - es importante indicar siempre el código de la tapicería al mismo tiempo que el artículo deseado cuando esté prevista dicha opción.

A	N	8	7	K	S	B	4	T	1	6	E	Z	G	F	H	9	Q	R	2	3	L	M	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PLANOS INCLINADOS

SOPORTES LATERALES

Los Planos Inclinaados de la línea marcus pueden equiparse con soportes laterales de contención o estabilización del paciente. En particular hay soportes laterales perfilados o bien acolchados, y empuñaduras con soportes para los antebrazos. Pueden ser, por lo tanto, pedidos con el número y tipo de preferencia, y según las exigencias específicas. Para la aplicación de tales soportes laterales son necesarios de los específicos dispositivos de bloqueo.



AC0910 DISPOSITIVOS DE BLOQUEO

El dispositivo de bloqueo consiente la aplicación de soportes laterales al Plano Inclinado. Tal dispositivo de bloqueo puede ser, por lo tanto, regulado a lo largo de una barra lateral permitiéndolo también una regulación en profundidad (Un par).



LA ERGONOMÍA DE LA APLICACIÓN DE LOS SOPORTES LATERALES

El terapeuta tiene que aplicar, ante todo, un dispositivo de bloqueo sobre una barra lateral, que se encuentra en ambos los lados del Plano Inclinado; tal operación preliminar es fácil y no necesita ningún utensilio. Sucesivamente el dispositivo de bloqueo puede ser desplazado a lo largo de la barra hasta la posición que se crea más oportuna por la consiguiente aplicación del soporte lateral escogido. Las barras laterales citadas tienen una escala numérica de referencia la cual permite un posicionamiento preciso, y también predeterminado por un paciente específico. Todos los soportes laterales son ajustables en altura, profundidad y ancho.



Fase 1: montaje del dispositivo de bloqueo sobre la barra lateral.



Fase 2: haciéndolo deslizar posicionar el dispositivo de bloqueo para después fijarlo a la barra lateral.



Fase 3: introducir y regular el accesorio específico del dispositivo de bloqueo.

SOPORTES LATERALES

7

AC0919 SOPORTES PERFILADOS

Estos soportes están hechos de material blando color negro, se suministran con elementos cromados que permiten el ajuste de la anchura, así como la inserción de los dispositivos de bloqueo AC0910.

Los soportes insertados en los dispositivos de bloqueo son, por lo tanto, también regulables en profundidad y altura.



AC0922.W ? SOPORTES TAPIZADOS

Son soportes tapizados suministrados con elementos cromados los cuales permiten una regulación en anchura, así como la inserción en los dispositivos de bloqueo AC0910. Los soportes introducidos en los dispositivos de bloqueo son, por lo tanto también regulables en profundidad y en altura. Son soportes alternativos o complementarios a los soportes con forma codice AC0910.



AC0921 SOPORTES ANTEBRAZOS

Soportes antebrazos con empuñadura para estar más cómodo y seguro. Se pueden regular en altura como girarlos, mientras que los mandos se pueden regular también en profundidad. (2 piezas).



AC0920 MANGOS

Mangos laterales que permiten a los pacientes, en posición supina estática, de sostenerse durante la actividad física. Se pueden regular en altura y profundidad. (2 piezas).



? ELECCIÓN DE LOS COLORES DE LA TAPICERÍA - es importante indicar siempre el código de la tapicería al mismo tiempo que el artículo deseado cuando esté prevista dicha opción.

A	N	8	7	K	S	B	4	T	1	6	E	Z	G	F	H	9	Q	R	2	3	L	M	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PLANOS INCLINADOS

MESA Y OTROS ACCESORIOS APLICABLES

La mesa puede ser un accesorio importante para un estabilizador en postura erguida, supina o prona, ya que el paciente mientras está en pie puede apoyar cómodamente los antebrazos, objetos, y llevar a cabo actividades que de otra manera no podría. Proponemos por lo tanto la mesa en dos materiales diferentes, bien en madera o en polietileno, para responder respectivamente a las preferencias del usuario en el caso de uso doméstico o uso del terapeuta en un centro de rehabilitación.



AC0914.060 MESA DE MADERA EN 60

Esta mesa está hecha de madera y es de gran tamaño con las esquinas redondeadas, y una parte rebajada para facilitar la aproximación del usuario. El accesorio es adecuado para planos con un ancho de segmentos igual a 60 cm, y que pertenece a la línea de Marcus con los códigos LT41 o LT42.

Finalmente se le puede aplicar accesorios adicionales tales como el acolchado de color, una bandeja con rebordes, mangos para ayudar a estabilizarse. Dimensiones: ancho 680 mm x profundidad 430 mm x 12 mm de espesor. Peso: 2,1 kg.

AC0914.075 MESA DE MADERA EN 75

Este accesorio tiene las mismas características de la mesa identificada con el Código AC0914.060 a excepción del hecho que se puede aplicar solo a un Plano Inclinado que tenga la anchura de los segmentos igual a 75 cm, y siendo de la línea Marcus con los códigos LT41 o LT42. Dimensiones: anchura 680 milímetros x profundidad 430 mm x espesor 12 mm. Peso: 2,1 kg.



AC0915.060 MESA DE POLIETILENO EN 60

Esta mesa es en Polietileno, antibactericida y de grandes dimensiones; con las esquinas bien redondeadas, y una parte rebajada para facilitar al usuario aproximarse. El accesorio es adecuado para planos con un ancho de segmentos de 60 cm, perteneciendo a la línea de Marcus con los códigos LT41 o LT42. Finalmente se le puede aplicar los siguientes accesorios a la mesa tales como el acolchado de color, una bandeja con rebordes, mangos para ayudar a estabilizarse. Dimensiones: anchura 680 mm x profundidad 430 mm x 12 mm de espesor. Peso: 3 kg.

AC0915.075 MESA DE POLIETILENO EN 75

Este accesorio tiene las mismas características de la mesa identificada con el Código AC0915.060 a excepción del hecho que se puede aplicar solo a un Plano Inclinado que tenga la anchura de los segmentos igual a 75 cm, y siendo de la línea Marcus con los códigos LT41 o LT42. Dimensiones: anchura 680 milímetros x profundidad 430 mm x espesor 12 mm. Peso: 3 kg.


REGULACIONES DE LA MESA

Es ajustable en inclinación en cuatro posiciones predefinidas, con una diferencia de 5 grados para cada posición y hasta 20 grados en el positivo. A través de los dispositivos de bloqueo en las barras laterales, también es posible realizar más ajustes en altura y profundidad con el fin de obtener la posición más cómoda y segura.



MESA Y OTROS ACCESORIOS APLICABLES

7

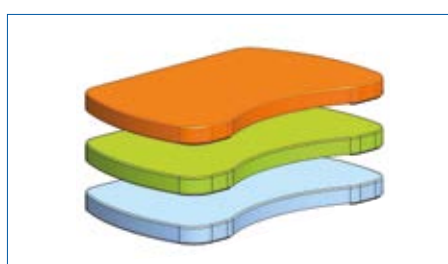

AC0767.W ?

ACOLCHADO MESA GRANDE

Es un acolchado que hace que la mesa sea más cómoda para apoyar los antebrazos. Este accesorio es de fácil instalación.

Tapizado en cuero y está disponible en tres colores diferentes como propuesta estándar. Por favor, especifique en el pedido siempre el código de identificación del color elegido. Dimensiones: anchura 680 mm x profundidad 430 mm x 12 mm de espesor.



AC0764

BANDEJA EN ABS GRANDE

En caso de necesidad se puede colocar encima de la mesa dicha bandeja en Abs lisa con rebordes. Este accesorio se puede ser quitar en caso de necesidad de limpieza, mientras el paciente todavía está de pie sobre la mesa.

Dimensiones: anchura 680 mm x profundidad 430 mm x 12 mm de espesor.



01608 EMPUÑADURA

Ergonómica que se puede aplicar con el fin de obtener una mayor estabilidad y un posicionamiento seguro de la mano.



01609 MUÑEQUERA

Con cojinete de apoyo y Brazaletes de velcro permitiendo la colocación de la mano con la máxima seguridad.

LA TRANSFORMACIÓN DEL PLANO INCLINADO

Para los ejercicios de estática en posición supina o prono

Una de las características distintivas de nuestros Planos Inclinales de la línea Marcus es la posibilidad de ampliar las condiciones de los ejercicios terapéuticos, incluso para servir a un mayor número de usuarios, pasando de una situación estática supina a una condición diferente de estática prona. En consecuencia, independientemente de la configuración básica seleccionada, es decir, un modelo identificado con el código LT41 o LT42, es siempre posible comprar al mismo tiempo o en un momento posterior los accesorios necesarios para transformar el Plano Inclinado.



AC0908.060.W ? CABEZAL POSICIÓN SUPINA W60

La aplicación de este cabezal a un Plano Inclinado con un código LT42 permite ejercicios estáticos en decúbito supino. Esta sección puede ser instalada fácilmente sin necesidad de herramientas para su fijación, y tiene dos asas en el lateral. Cuando se ha completado el montaje, se bloquea mediante una palanca que asegura que no se puede quitar. La sección acolchada es de 60 cm de ancho, y es adecuada para usarla con un Plano Inclinado de un ancho similar. Dimensiones: 74 x 60 x 11 cm. Peso: 10 kg (pieza única)

AC0908.075.W ? CABEZAL POSICIÓN SUPINA W75

Esta sección de cabezal tiene las mismas características que el cabezal identificado con el código AC0908.060.W? a excepción de la anchura igual a 75 cm. Por lo tanto, es adecuado para una aplicación a un Plano inclinado con una opción de anchura elegida de forma similar. Dimensiones: 74 x 75 x 11 cm. Peso: kg 11 (pieza única)



AC0909.036.W ? SOPORTE TORÁCICO

Esta sección acolchada de soporte al paciente a nivel torácico puede ser aplicado a los Planos inclinados identificados con los códigos LT41 ed LT42, consintiendo hacer ejercicios en prono. Es un accesorio que puede ser instalado fácilmente sin necesidad de herramientas para su fijación, y tiene 36 cm de ancho. Cuando la inserción está completa, el soporte es ajustable en altura para ajustar la estatura del paciente y en busca de una posición cómoda. Dimensiones: 58 x 36 x 10 cm. Peso: kg 3



AC0918.1W ? SOPORTE ACOLCHADO

En el caso de un Plano inclinado LT42, o de un Plano inclinado LT41 con el cabezal retirado, cuando se pretende transformar este ultimo para utilizarlo en estática prono, es posible insertar en la parte superior del Plano inclinado una sección acolchada para el cómodo apoyo de los miembros superiores. Dicho accesorios se puede pedir en el mismo color que el Plano inclinado. En caso de pedido, recuerden siempre de indicar el código de identificación del color elegido. Dimensiones: 72 x 14 x 12 cm. Peso: kg 1



? ELECCIÓN DE LOS COLORES DE LA TAPICERÍA - es importante indicar siempre el código de la tapicería al mismo tiempo que el artículo deseado cuando esté prevista dicha opción.

A	N	8	7	K	S	B	4	T	1	6	E	Z	G	F	H	9	Q	R	2	3	L	M	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



LAS PEANAS Y LAS SANDALIAS

En el momento del pedido del Plano inclinado es necesario indicar la peana que hubieran elegido entre las disponibles.

Sin embargo, siempre es posible, pedir peanas adicionales para configurar una configuración diferente.



AC0942

PEANA ÚNICA

Peana entera, no regulable en inclinación; el soporte es regulable 21 centímetros en la dirección de la longitud del Plano inclinado; accesorio sobre pedido AC0002. Dimensiones 45 x 41 x 44 cm; Peso: kg 5 (1 unidad)



AC0943

PEANAS INCLINABLES, MÓDULO ÚNICO

Peanas, derecha e izquierda, regulables de forma independiente en inclinación +/- 20°; el soporte es regulable 6 cm. en la dirección de la longitud del Plano inclinado; accesorio sobre pedido AC0002. Dimensiones 45 x 50 x 52 cm; Peso: kg 9 (1 unidad)



AC0944

PEANAS INCLINABLES, DOS MÓDULOS

Peanas, derecha e izquierda, regulables de manera independiente en inclinación +/- 20°; El soporte de cada peana es además regulable por separado en 8 cm. en la dirección de la longitud del Plano inclinado; accesorio sobre pedido AC0002. Dimensiones 45 x 48 x 45 cm; Peso: kg 4,5 (2 unidades)

REGULACIONES EN INTRA - EXTRA ROTACIÓN EN EL ANTERIOR - POSTERIOR DE LOS PIES

Las sandalias intra-extra pueden ser reguladas en rotación intra-extra y antero-posterior. Se pueden pedir como accesorio, código AC0002




AC0002 SANDALIAS INTRA-EXTRA

Se aplican a las peanas individuales, permitiendo una contención y estabilización de los pies. Regulables en intra-extra rotación, y antero-posterior. (2 unidades)



AC0096 CUÑA PARA PIÉ EQUINO

Es posible adaptar las peanas de apoyo para una mayor inclinación de las peanas que se extienden hasta - 30° y en flexión + 10° cuando sea necesario para paciente con pie equino. Sobre pedido específico..

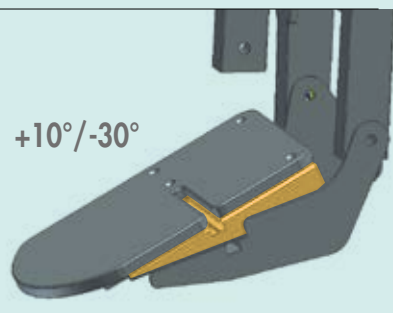

PARTES ELECTRICAS


7

En caso de daños o agotamiento de la batería suministrada se puede pedir una batería adicional con el código como accesorio indicado más abajo. Es muy importante respetar las modalidades de recarga de la batería para alargar la vida útil de la misma. Todos los Planos inclinados con alimentación a baterías se suministran con un carga-baterías de serie. Por lo tanto es posible pedir un carga-baterías de reserva o en caso de pérdida. Además todos los modelos con regulación eléctrica de la inclinación vienen suministrados con un mando magnético. Sin embargo, también es posible integrar dicha dotación con un mando adicional o un pedal con soporte al bastidor de base.



AC0319 CARGA BATERIAS

Recarga la batería suministrada o la de reserva mediante conexión a la red eléctrica. Se suministra con enchufe standard. La alimentación es a 110 / 220 V - 50 / 60 Hz - 500 mA.

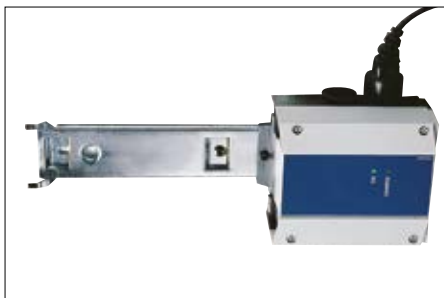

AC0318 CARGA BATERIAS DE PARED

Recarga la batería suministrada o la de reserva mediante conexión eléctrica. Se suministra con enchufe standard. La alimentación es a 110 / 220 V - 50 / 60 Hz - 500 mA.



01132 BATERÍA DE RESERVA

Permite un uso continuo durante su carga, la batería es de serie. La alimentación interna es de 24 V.



AC0037 PEDAL ADICIONAL 1

Para los modelos suministrados con un solo motor. Se puede utilizar en ambos lados.



AC0997 SOPORTE PARA MANDO

Se puede utilizar en ambos lados de la base del Plano inclinado a elección del operador, consintiendo el alojamiento del accesorio sobre pedido AC0083.



AC0083 MANDO ADICIONAL 1

Se puede utilizar tanto como pedal junto a su soporte código AC0575, o como un mando manual. Es un mando con imán para poderlo colocar donde se quiera.



AC0039 MANDO ADICIONAL 1

Mando ergonómico de nueva generación con imán. Se puede colocar sobre la base a elección del operador. Se suministra con cable de conexión.



AC0744 MANDO ADICIONAL 2

Para los modelos que están dotados de dos motores, mandos portátiles ergonómicos con imanes, conectables a las partes metálicas de la estructura del Plano inclinado. Suministrado con cable de conexión.



AC0578 DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

El dispositivo consiente desactivar las funciones eléctricas disponibles cuando está ausente el operador.

Pos. 5

Regulación de la inclinación

- ☐ **E** Eléctrica con alimentación de pared
- ☐ **B** Eléctrica, con alimentación a batería 24V
- ☐ **H** Asistida con pistón hidráulico

Pos. 6

Tipo de control

- ☐ **A** Eléctrico, con mando a pedal
- ☐ **D** Eléctrico, con mando manual
- ☐ **G** Eléctrico, con doble control
- ☐ **C** Hidráulico, con pedal

Pos. 7

Las peanas

- ☐ **1** Perna única
- ☐ **2** Perna única regulable
- ☐ **3** Perna regulable 2 módulos

Pos. 8-9-10

Ancho de las secciones

- ☐ **060** Anchura 60 cm
- ☐ **075** Anchura 75 cm

Pos. 11


Tipo simipiel

- ☐ **W** Colección Giotto

Pos. 12

Colores de la tapicería

Gama standard de 24 colores

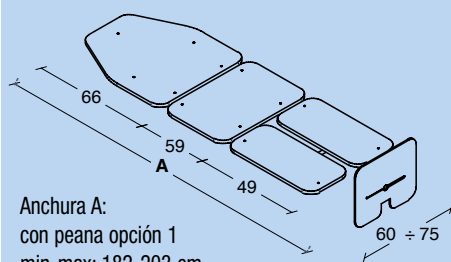

Anchura A:
con perna opción 1
min-max: 182-203 cm

con perna opción 2
min-max: 191-197 cm

con perna opción 3
min-max: 189-197 cm

Para más información sobre opciones y accesorios, rogamos consulten los apartados específicos.



L	T	4	1									W
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	



Modelo representado - código LT41 BG3 060 W3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de secciones	4
Carga máx. soportado (kg)	180 kg (versión eléctrica) 135 kg (versión hidráulica)
Regulación de la inclinación	eléctrica / hidráulica
Alimentación eléctrica	de red / Batería
Indicador de la inclinación en grados	de serie
Grados máx de la inclinación	90°
Altura Plano inclinado desde tierra (cm)	56
Altura máx paciente (cm)	205 (posición supina)
Diámetro rueda (mm)	12.5 cm
Sistema de freno	Sobre cada rueda
Rueda direccional	de serie
Revest. acolchado clase de seguridad	1 IM
Espesor acolchado (mm)	30
Densidad (kg/m3)	30
Peso (kg)	65



? ELECCIÓN DE LOS COLORES DE LA TAPICERÍA - es importante indicar siempre el código de la tapicería al mismo tiempo que el artículo deseado cuando esté prevista dicha opción.

A	N	8	7	K	S	B	4	T	1	6	E	Z	G	F	H	9	Q	R	2	3	L	M	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pos. 5

Regulación de la inclinación

- ☐ **E** Eléctrica con alimentación de pared
- ☐ **B** Eléctrica, con alimentación a batería 24V
- ☐ **H** Asistida con pistón hidráulico

Pos. 6

Tipo de control

- ☐ **A** Eléctrico, con mando a pedal
- ☐ **D** Eléctrico, con mando manual
- ☐ **G** Eléctrico, con doble control
- ☐ **C** Hidráulico, con pedal

Pos. 7

Las peanas

- ☐ **1** Perna única
- ☐ **2** Perna única regulable
- ☐ **3** Perna regulable 2 módulos

Pos. 8-9-10

Ancho de las secciones

- ☐ **060** Anchura 60 cm
- ☐ **075** Anchura 75 cm

Pos. 11


Tipo similpiel

- ☐ **W** Colección Giotto

Pos. 12


Colores de la tapicería

Gama standard de 24 colores

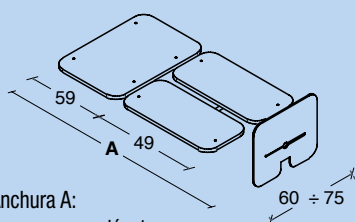

Anchura A:
con peana opción 1
min-max: 115-136 cm
con peana opción 2
min-max: 124-130 cm
con peana opción 3
min-max: 122-130 cm

Para más información sobre opciones y accesorios, rogamos consulten los apartados específicos.

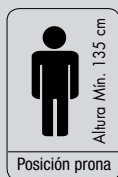

L	T	4	2									W
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	



Modelo representado - código LT42 HC1 060 W3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de secciones	3
Carga máx. soportado (kg)	180 kg (versión eléctrica) 135 kg (versión hidráulica)
Regulación de la inclinación	eléctrica / hidráulica
Alimentación eléctrica	de red / Batería
Indicador de la inclinación en grados	de serie
Grados máx de la inclinación	90°
Altura Plano inclinado desde tierra (cm)	56
Altura mínima del paciente (cm)	135 (posición prona)
Diámetro rueda (mm)	125
Sistema de freno	En cada rueda
Rueda direccional	de serie
Revest. acolchado clase de seguridad	1 IM
Espesor acolchado (mm)	30
Densidad (kg/m3)	30
Peso (kg)	55



? ELECCIÓN DE LOS COLORES DE LA TAPICERÍA - es importante indicar siempre el código de la tapicería al mismo tiempo que el artículo deseado cuando esté prevista dicha opción.

A	N	8	7	K	S	B	4	T	1	6	E	Z	G	F	H	9	Q	R	2	3	L	M	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TiltTables *Para posición supina y tratamientos*

ACCESORIOS ESPECÍFICOS



AC0003

SOPORTES LATERALES

Soportes laterales en material flexible, regulable en altura, anchura y profundidad. (2 piezas)



AC0004

EMPUÑADURA

Empuñadura lateral para una sujeción y un autoapoyo activo por parte del paciente durante el ejercicio en estática supina. Son regulables en altura y en profundidad. (2 piezas)



AC0517.W ?

SOPORTES ACOLCHADOS

Soportes laterales acolchados ofrecen una superficie mayor de contacto con el paciente. Estos son complementarios o alternativos al artículo cod. AC0003 siendo regulables en altura, en anchura y en profundidad. (2 piezas)



AC0090

SOPORTES ANTEBRAZOS

Regulables. Sujeción para los antebrazos con empuñadura para su comodidad. Son regulables en altura y en rotación, mientras que las empuñaduras son regulables también en profundidad. (2 piezas)



AC0081

MESA ESTÁTICA SUPINO

Mesa utilizable con los Planos inclinados de una, tres o cuatro secciones con persona en posición en estática supina.

La mesa favorece un ágil apoyo de los antebrazos. Es regulable en altura, en profundidad e inclinación. Dimensiones: cm 70 x 56



AC0020.W ?

TAPA HUECO BUCO-NASAL

Los Planos inclinados se suministran sin tapa para el hueco buco-nasal. Se puede pedir como accesorio opcional en el color del Plano inclinado.

PLANOS INCLINADOS




LT2E12.W? TILT TABLE 2E T

Plano inclinado de cuatro secciones con sistema de inclinación eléctrico alimentado a red. Carga máxima soportada kg 140. Inclinación de la base hasta 90° y altura del mismo regulable cm 56-106 mediantemando. El grado de inclinación del Plano inclinado es medible mediante el indicador integrado. El cabezal inclinable en positivo/negativo con pistón a gas. Las bandas de contención no están incluidas, se pueden pedir separadamente (mira la sección "Accesorios" del capítulo). Una guía central entre las dos secciones de apoyo para los miembros inferiores consienten una mejor aplicación y fijamiento de la banda de seguridad. Las ruedas de un amplio diámetro agilizan las transferencias y están dotadas de freno. Una rueda es direccional. Las peanas son regulables de manera independiente +/- 20°.

LT2B12.W? TILT TABLE 2B T

Versión con sistema de inclinación alimentado a batería recargable 24 V. Se suministra con un carga baterías.

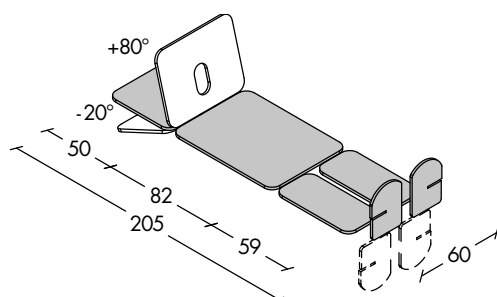

CARACTERISTICAS TECNICAS		
CÓDIGO ARTICULO	LT2E12 Tilt table E	LT2B12 Tilt table B
Numero de secciones	4	4
Carga maxima solportad (Kg)	140	140
Regulación en inclinación	eléctrica	eléctrica
Regulación en altur (cm)	56 - 106	56 - 106
Alimentación eléctrica	de red	a batería
Indicador de inclinación en grados	de serie	de serie
Altura máxima usuario (cm)	200	200
Diámetro ruedas (mm)	125	125
Sistema de frenado individual	sobre una sola rueda	sobre una sola rueda
Rueda direccional	de serie	de serie
Revestimiento acolchado clase de seguridad	1 IM	1 IM
Espesor acolchado (mm) / densidad (kg/mc)	30 / 30	30 / 30
Peso (Kg)	100	100

ACCESORIOS

Cinchas y otros soportes acolchados
AC0005 CINCHA DE BASE
AC0006 ACOLCHADO PARA CINCHA
AC0560 CINCHA TRONCO ACOLCHADA
AC0561 CINCHA PIERNAS SEPARADAS
AC0088 CINCHA PIERNASACOLCHADA
AC0020.W ? TAPA BUCO-NASAL
AC0087.W ? COJÍN CERVICAL
AC0911 CUÑA
AC0912 GUÍA PARA CINCHA DE BASE
AC0913 CINCHA ERGONÓMICA 60
 Soportes laterales
AC0003 SUJECIÓN TRONCO
AC0004 SOPORTES ANTE BRAZOS
AC0090 SOPORTES ANTE BRAZOS
AC0517.W ? SOPORTES ACOLCHADOS
 Mesa
AC0081 MESA STATICA SUPINA
 Peanas y sandalias
AC0002 SANDALIAS INTRA-EXTRA
AC0096 CUÑA PIE EQUINO

Para los modelos eléctricos: 220 V 50 / 60 Hz / 24 V 70 VA - Para los modelos a baterías: 24 V; Carga baterías: 110 / 220 V - 50 / 60 Hz - 500 mA.


? ELECCIÓN DE LOS COLORES DE LA TAPICERÍA - es importante indicar siempre ie código de la tapicería al mismo tiempo que el artículo deseado cuando esté prevista dicha opción.

A	N	8	7	K	S	B	4	T	1	6	E	Z	G	F	H	9	Q	R	2	3	L	M	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bobath Table *Con función de inclinación*

Este modelo ha sido concebido para facilitar al operador y al paciente durante el programa rehabilitador en el gimnasio, evitando los tiempos y la posible incomodidad de pasar de una camilla a otra.

ACCESORIOS ESPECÍFICOS

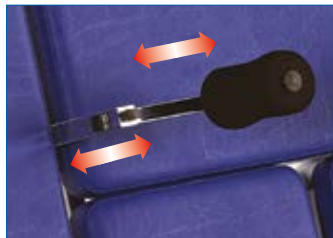


Sujeción tronco lateral accesorio AC0003 (2 unidades)



Soportes ante brazos accesorio AC0004 (2 unidades)



Guía para fijar la cincha accesorio AC0312 (Una unidad)

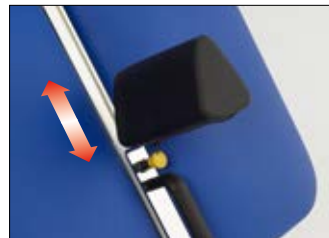

Retractor de las extremidades inferiores accesorio AC0911 (Una unidad)



Sandalias para contener los pies accesorio AC0002 (2 unidades)



Mesa de estática en supino accesorio AC0308 (Una unidad)

PLANOS INCLINADOS

NOTA:

1) Esta previsto un dispositivo de seguridad específico para uso alternativo de la regulación en altura o en inclinación.

2) Esta previsto un sistema de seguridad adicional manual de bajada en caso de interrupción de electricidad.



Inserción grupo peanas para uso Plano inclinado en estatica supina

CE

LB492F2X ?

TILT TABLE BOBATH 2ET




Plano inclinado Bobath de seis secciones para manipulaciones y estática en posición supina. Regulable en altura hasta kg 250 (peso soportado), o bien en inclinación de 0 a 90° hasta kg 190 con alimentación a red, en baja tensión 24V con mando de pulsadores. Tiene un indicador de inclinación siendo la altura mínima desde suelo de 55cm. No se suministra con ninguna cincha, por lo tanto les recomendamos elegirlos en los accesorios disponibles. El cabezal es regulable en positivo/negativo con pistón a gas y se suministra con la tapa buco-nasal. Además, una predisposición central entre las secciones de apoyo de los miembros inferiores consintiendo una mejor aplicación y fijación de la cincha de contención utilizando el accesorio AC0312.

También se le puede incorporar un retractor de pierna accesorio AC0911. El acolchado de la Camilla es con banda lateral. Las ruedas tienen un sistema de frenado activándolas con el pedal. Las peanas son regulables de manera independiente +/- 20° y se son removibles cuando se considere oportuno durante las sesiones de fisioterapia.



Grupo de peanas removibles de apoyo pies

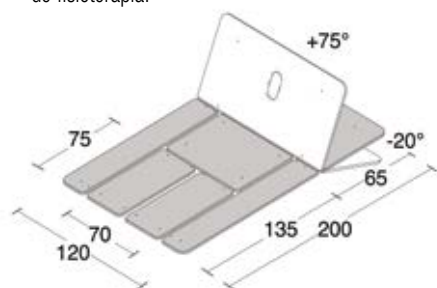

CARACTERISTICAS TECNICAS	
CÓDIGO ARTICULO	LB492F2X
	Tilt table Bobath 2ET
Número de secciones	6
Carga maxima soportada - en altura (Kg)	250
Carga maxima soportada - en estática (Kg)	190
Regulación en inclinación	eléctrica
Regulación en altura (cm)	55 - 105
Alimentación eléctrica	de red
Indicador de inclinación en grados	de serie
Altura maxima usuario (cm)	200
Diámetro ruedas (mm)	65
Sistema de frenado	centralizado
Rueda direccional	No se aplica
Revestimiento acolchado clase de seguridad	1 IM
Espesor del acolchado (mm) / densidad (kg/mc)	40 / 30
Peso (Kg)	170

ACCESORIOS

Cinchas y otros soportes acolchados

AC0005 CINCHA DE BASE

AC0006 ACOLCHADO PARA CINCHA

AC0911 CUÑA DIVARICATORE

AC0912 GUÍA PARA CINCHA DE BASE

Soportes laterales

AC0003 SUJECCIÓN TRONCO

AC0004 SUJECCIÓN ANTEBRAZOS

AC0090 SOPORTES ANTEBRAZOS

AC0517.W ? SOPORTES ACOLCHADOS

Mesa

AC00308 MESA PARA BOBATH TILT

Peanas y sandalias

AC0002 SANDALIAS INTRA-EXTRA

AC0096 CUÑA PIE EQUINO

Para los modelos eléctricos: 220 V 50 / 60 Hz / 24 V 70 VA - Para los modelos a baterías: 24 V; Carga baterías: 110 / 220 V - 50 / 60 Hz - 500 mA.

? ELECCIÓN DE LOS COLORES DE LA TAPICERÍA - es importante indicar siempre el código de la tapicería al mismo tiempo que el artículo deseado cuando esté prevista dicha opción.

A	N	8	7	K	S	B	4	T	1	6	E	Z	G	F	H	9	Q	R	2	3	L	M	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Apéndice I - Tabla de accesorios

Más abajo se enumeran todos los accesorios comunes o específicos para los modelos configurables del Marcus y de los modelos motorizados dobles que permiten el ajuste de la altura y de la inclinación. Esta tabla está configurada para facilitar y confirmar la aplicabilidad del accesorio único para cada Plano inclinado existente, así como dependiendo de la anchura de los segmentos de los mismos si estuviese previsto. Para obtener detalles sobre el accesorio específico o el kit de accesorios, consulte el párrafo dedicado. Recuerde que, a diferencia de las opciones de configuración del producto, el accesorio en general se puede elegir en cualquier momento después de comprar el producto.

PLANOS INCLINADOS



? ELECCIÓN DEL COLOR - en caso de pedido añadir al código del Plano inclinado el código de la tapicería escogido.

A	N	8	7	K	S	B	4	T	1	6	E	Z	G	F	H	9	Q	R	2	3	L	M	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÓDIGO	MARCUS Line				Tilt tables w/2 motores	
	LT41		LT42		LT2 E/B	LB492
	W 60 cm	W 75 cm	W 60 cm	W 75 cm	W 60 cm	W 120 cm
AC0005 CINCHA DE BASE	•	•	•	•	•	•
AC0006 ACOLCHADO PARA CINCHA	•	•	•	•	•	•
AC0560 CINCHA TRONCO ACOLCHADA	•		•		•	
AC0561 CINCHA PIERNAS SEPARADAS	•		•		•	
AC0088 CINCHA ACOLCHADA PIERNAS	•		•		•	
AC0087.W? COJÍN CERVICAL LT2					•	
AC0949.W? COJÍN CERVICAL LT4	•	•	•	•		
AC0911 CUÑA DIVISORIA	•	•	•	•		•
AC0912 GUÍA PARA CINCHA DE BASE	•	•	•	•		•
AC0913 CINCHA ERGONOMICA 60	•		•		•	
AC0947 CINCHA ERGONOMICA 75		•		•		
AC0020.W? TAPA HUECOBUCO-NASAL					•	
AC0003 SUJECIÓN TRONCO					•	•
AC0004 SOPORTES ANTE BRAZOS					•	•
AC0090 SOPORTES ANTE BRAZOS (regulables)					•	•
AC0517.W? SOPORTES ACOLCHADOS 2					•	•
AC0910 DISPOSITIVOS DE BLOQUEO	•	•	•	•		
AC0919 SOPORTES REDONDEADOS	•	•	•	•		
AC0920 MANOPLAS	•	•	•	•		
AC0921 SOPORTES ANTE BRAZOS (con empuñadura)	•	•	•	•		
AC0922.W? SOPORTES ACOLCHADOS	•	•	•	•		
AC0908.060W? CABEZAL POSICIÓN SUPINA W60			•			
AC0908.075W? CABEZAL POSICIÓN SUPINA W75				•		
AC0909.036 SOPORTE TORÁCICO	•	•	•	•		
AC0918.1W? SOPORTE ACOLCHAD	•	•	•	•		
AC0081 MESA ESTÁTICA SUPINA					•	
AC0308 MESA PARA BoBATH TILT						•
AC0914.060 MESA DE MADERA 60	•		•			
AC0914.075 MESA DE MADERA 75		•		•		
AC0915.060 MESA EN POLIETILENO 60	•		•			
AC0915.075 MESA EN POLIETILENO 75		•		•		
AC0767.W? ACOLCHADO MESA GRANDE	•	•	•	•		
AC0764 PLANO GRANDE EN ABS	•	•	•	•		
AC1608 ANCLAJE MANO	•	•	•	•		
AC1609 ANCLAJE PULSO	•	•	•	•		
AC0002 SANDALIAS INTRA EXTRA	•	•	•	•	•	•
AC0096 CUÑA PARA PIE EQUINO	•	•	•	•	•	•
AC0942 PEANA INDIVIDUAL	•	•	•	•		
AC0943 PEANA REGULABLE, UN MÓDULO	•	•	•	•		
AC0944 PEANA REGULABLE, DOS MÓDULOS	•	•	•	•		

NOTAS:

Cinchas y otros elementos acolchado

Soportes lateral y empuñaduras

Posibilidad de transformare el modelo base

Mesa y accesorios aplicables

Peanas y sandalias


Apéndice II Cojines posturales

COJINES POSTURALES


Los cojines posturales se encuentran disponibles en diferentes formas y dimensiones para satisfacer las diferentes necesidad profesionales según la posición que debe adoptar el paciente. Nuestros cojines están hechos de espuma de goma de densidad variable y están forrados de imitación piel anti-bacterica, fáciles de lavar y de larga durabilidad. La densidad estándar es 21 kg/m³. Los forros de los cojines tienen una cremallera para quitarlos fácilmente y hay una gama de tapizados de 24 opciones de colores. Los cojines se pueden adquirir del mismo color del forro de las camillas para consultas y tratamientos.




AC0024.W ? COJÍN FACIAL
A 31 x P 23 x H 6

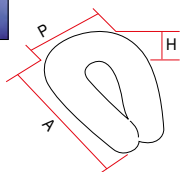


AC0025.W ? COJÍN CON AGUJERO
A 40 x P 34 x H 9

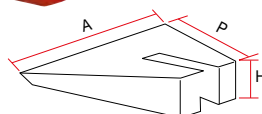



10321.W ? SOPORTE LORDOSIS
A 29 x P 14 x H 5

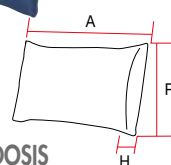


10300.W ? FORMA SEMICILÍNDRICA 1
A 48 x P 25 x H 18

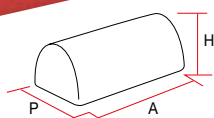

09940.W ? FORMA CÚBICA 1
A 40 x P 40 x H 40

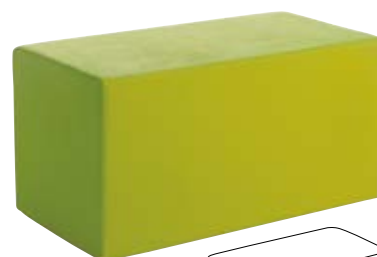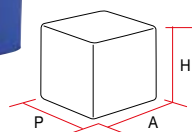

09700.W ? FORMA RECTANGULAR 1
A 40 x P 20 x H 10

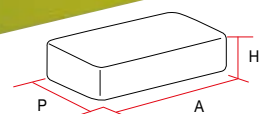

10310.W ? FORMA SEMICILÍNDRICA 2
A 60 x P 40 x H 18

09950.W ? FORMA CÚBICA 2
A 50 x P 50 x H 50



09730.W ? FORMA RECTANGULAR 2
A 40 x P 30 x H 5

09740.W ? FORMA RECTANGULAR 3
A 40 x P 30 x H 10

09820.W ? FORMA RECTANGULAR 4
A 80 x P 40 x H 40



11250.W ? LEG PILLOW
A 77 x P 50 x H 20/15

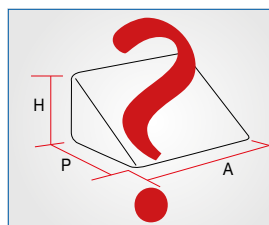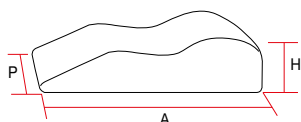

COJINES HECHOS A LA MEDIDA


Si se solicita, podemos fabricar cojines de dimensiones y densidades diferentes de las estándar.

Envíenos sus pedidos por correo electrónico a la siguiente dirección:
export@chinesport.it

CLAVE: A = ancho; P = profundidad; H = altura, en centímetros

? ELECCIÓN DE LOS COLORES DE LA TAPICERÍA - es importante indicar siempre el código de la tapicería al mismo tiempo que el artículo deseado cuando esté prevista dicha opción.

A	N	8	7	K	S	B	4	T	1	6	E
Z	G	F	H	9	Q	R	2	3	L	M	P

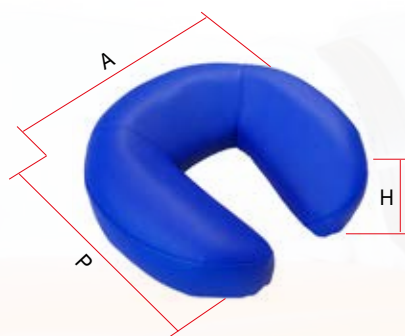


AC0881.W ? COJÍN FACIAL 2


Un cojín con una forma especial y densidad que hace cómoda la posición prona del paciente durante el tratamiento y la terapia. Se recomienda este cojín para ofrecer el mayor relajamiento posible al paciente. Dimensiones: A 29 x P 31 x H 9 cm.

FORROS EXTRAÍBLES


Todos los colchones y cojines de Chinesport tienen un forro de imitación piel ignífugo y antibacterio, de larga durabilidad y que se puede quitar y lavar.

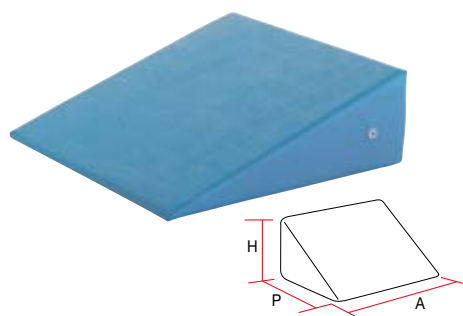

- 09600.W ? CUÑA 1 - A 25 x P 25 x H 10
- 09610.W ? CUÑA 2 - A 35 x P 35 x H 10
- 09620.W ? CUÑA 3 - A 60 x P 45 x H 15
- 09630.W ? CUÑA 4 - A 60 x P 45 x H 30
- 09640.W ? CUÑA 5 - A 60 x P 60 x H 15
- 09650.W ? CUÑA 6 - A 60 x P 60 x H 20

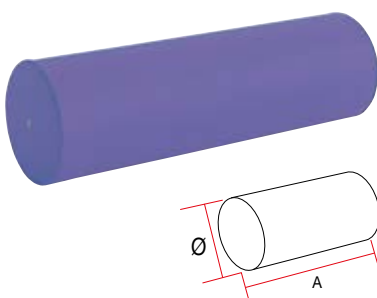

- 10000.W ? CILINDRO 1 - A 20 x Ø 8
- 10010.W ? CILINDRO 2 - A 35 x Ø 15
- 10020.W ? CILINDRO 3 - A 50 x Ø 15
- 10030.W ? CILINDRO 4 - A 50 x Ø 25
- 10050.W ? CILINDRO 5 - A 100 x Ø 25

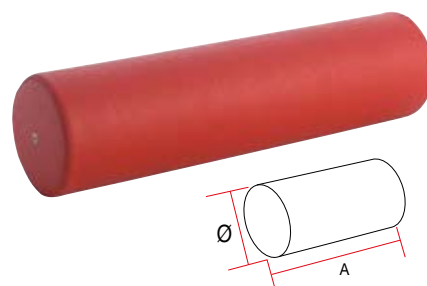

- 10130.W ? RODILLO RÍGIDO 1 - A 100 x Ø 30
- 10150.W ? RODILLO RÍGIDO 2 - A 100 x Ø 40
- 10160.W ? RODILLO RÍGIDO 3 - A 100 x Ø 50
- 10200.W ? RODILLO RÍGIDO 4 - A 50 x Ø 30



Los cojines tienen diferentes medidas y son elásticos y se adaptan a diferentes formas fácilmente, pero siempre regresan a su forma original. Son un soporte ideal para la zona lumbar y lateral, así como para las extremidades superiores e inferiores. Están forrados de material lavable y transpirante.

- 01449 COJÍN POSTURAL 100 - ø cm 19 x 17
- 01450 COJÍN POSTURAL 110 - ø cm 19 x 31
- 01451 COJÍN POSTURAL 120 - ø cm 25 x 37
- 01452 COJÍN POSTURAL 8 - cm 40 x 20 x 13 H
- 01453 COJÍN POSTURAL 88 - cm 50 x 28 x 13 H

01426 KIT POSTURAL

El conjunto consta de 5 almohadas, uno para cada tipo como anteriormente representado y una bolsa para el transporte y la contención de dimensiones cm 33 x 33 x 56 h.



Apéndice III Otras camillas para tratamientos

Con una larga experiencia de varias décadas, Chinesport ofrece un rango de camillas adaptables para tratamientos para varios usos y con diferentes características estructurales. Nuestra oferta cubre varias opciones incluidas las camillas para consultas, para traslados, para tratamientos, manipulaciones y para tratamientos específicos y masajes.

El código de producto Chinesport para las camillas regulables en altura es un “código abierto” que cambia según la selección de diferentes opciones disponibles para cada modelo. Cada código de posición tiene un específico significado que corresponde a uno más características de la camilla.

Puede consultar el capítulo 1 “Camillas para terapia” en el Catálogo General – Edición internacional, o el suelto dedicado para obtener mayores informaciones sobre nuestra gama de camillas para tratamientos. Estos documentos se pueden descargar también consultando www.chinesport.com.



Esta es la clásica gama de camillas para consultas y tratamientos que se componen de dos secciones fundamentalmente, con una cabecera de 68 cm de largo que se puede usar también como respaldo. El respaldo se puede regular en inclinación positiva y negativa: hasta $+70^{\circ}/-20^{\circ}$. La altura se puede regular mediante una motorización que usa equipos de los más confiables en el mercado. Existe una versión hidráulica como alternativa. La estructura es única debido a su forma simple y diseño armonioso, que se encuentra registrado en la Comunidad Europea. Algunas de nuestras camillas se encuentran disponibles también con ruedas más grandes para poder trasladar también a los pacientes. Esta configuración se puede completar con un juego de barras laterales de seguridad.

VisitLine



Una diferencia fundamental con relación a la gama VISIT está en la longitud de la sección de la cabecera que es sólo de 52 cm. Por este motivo, no se puede usar como respaldo, pero se le pueden añadir apoyabrazos para ofrecer mayor comodidad al paciente en posición prona. Estas camillas han sido proyectadas para tratamientos de fisioterapia, osteopatía y para la llamada “Re-educación Global de la Postura”. Se pueden configurar con hasta seis secciones para obtener diferentes posiciones posturales para el paciente. Existe también un modelo que se puede disponer en posición de sentado para un especial uso en ginecología. Otra diferencia de la gama VISIT es que la sección de la cabecera tiene una mayor posibilidad de regulación de la inclinación, en positivo hasta $+85^{\circ}$ y en negativo hasta -35° , además de un hueco buco-nasal de serie.

TherLine



Esta gama es una alternativa a las clásicas gamas llamadas VISIT y THER para consultas, tratamientos y fisioterapias. En especial, la característica distintiva de estas camillas es que durante su regulación en altura las secciones individuales se quedan completamente inmóviles. Esto las hace particularmente adecuadas para ambientes limitados o para hacer mejor uso del espacio disponible así como para mantener la posición seleccionada para los ejercicios una vez que se ha predispuesto el sistema de poleoterapia. Se puede escoger una base simplificada y configurar la sección de cabecera con un respaldar que sea de 68 cm en lugar de una sección más pequeña de 52 cm de largo que podría incluir los apoya-brazos. La segunda modalidad de cabecera puede tener regulación de la inclinación positiva y negativa: hasta $+85^{\circ}/-35^{\circ}$.

uniXLine



Sinthesi

Nuestros sillones Sinthesi para tratamientos nos permiten colocar los pacientes en infinitas posiciones fácilmente para posturas miofasciales que se pueden mantener por períodos prolongados y sin esfuerzo. En esta posición de relajamiento, se pueden aplicar varias técnicas para facilitar la recuperación del estiramiento miofascial, para aumentar el rango del movimiento de las articulaciones y alcanzar una postura analgésica como alivio para los dolores agudos. Además, nuestras camillas Sinthesi ofrecen una posición inicial ideal para ejercicios que estimulan un estímulo a nivel central y un trabajo muscular isométrico.



BobathLine

Gama de camillas para tratamientos físicos que alcanzan hasta dos metros de largo y tienen una superficie total de cuatro metros. Las características de las medidas y estabilidad las hacen ideales para tratamientos neurológicos, ya que los pacientes pueden ser guiados mediante una amplia gama de ejercicios y experiencias sensoriales así como correcciones posturales. Esta gama incluye los modelos usados en el método R. I. C. – Rehabilitación Intensiva Continua. Por último, una versión especial que permite el uso para ejercicios en posición supina estática sin tener que trasladar al paciente hasta el gimnasio.



TestLine

Esta es una gama de camillas multi-funcionales para consultas y para tratamientos específicos. En especial, se pueden usar en podología, ginecología, urología, cardiología, geriatría, tratamientos de belleza phlebectomy e inclusive para el traslado de pacientes en el interior de la estructura hospitalaria. La altura de la camilla se puede regular eléctricamente o mediante un pistón hidráulico, mientras que las secciones móviles están asistidas por un sistema de pistón a gas. En algunas versiones, la sección del asiento se puede regular en altura mediante un motor. Como resultado, estas camillas pueden transformarse fácilmente en una posición de sentado, de relajamiento, de Trendelenburg y anti-Trendelenburg inclusive con el paciente encima. Por último, los accesorios especializados están disponibles para diferentes usos.



AluX Eva

Con esta gama, Chinesport se proyecta hacia los centros de belleza, los SPA con las camillas para masajes e introduce por primera vez algunas características adicionales tales como las secciones con calefacción con diferentes temperaturas y la tapicería de imitación piel que cubre los lados produce un efecto de acolchado agradable al tacto. Entre las otras opciones dignas de mencionar se encuentra la posibilidad de escoger la configuración con luces de LED para efectos de cromoterapia e inclusive cuando hay un solo ancho de sección como opción disponible, o una sola posibilidad de densidad de acolchado, los clientes pueden solicitar características y opciones personalizadas. Estas camillas tienen dos motores, así que pueden adoptar las posiciones de Trendelenburg y anti-Trendelenburg mediante un sistema de dos columnas telescópicas.

Struzzo *para moverse en autonomía*



Distribuidor para España

Avda. Camino de lo Cortao, 6/8 - Nave 43
28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid - España
Tel/Fax: +34 91 6505859 - rfernandez@rftservices.es

www.rftservices.es



CHINESPORT spa - Via Croazia, 2
33100 Udine - Italy
Tel +39 0432 621 621 - Fax +39 0432 621 620
export@chinesport.it

www.chinesport.com